

Atemschutzmaske

Filtrierende Halbmaske FFP2

Gemäß EN 149:2001 & A1:2009 FFP NR; Konform der Verordnung (EU) 2016/425

EN – Particle filtering half mask ffp2, according to DIN EN 149:2001 &

A1:2009 FFP NR, regulation (EU) 2016/425

GEBRAUCHSANLEITUNG | USER INSTRUCTIONS



Entfalten Sie die Maske und halten Sie sie an den Ohrenbändern mit dem Nasenbügel nach oben gerichtet. | Unfold the mask and hold it by the ear loops with the nose clip facing up.



Platzieren Sie die Maske über dem Kinn auf Ihrem Gesicht und befestigen Sie die Ohrenbänder hinter den Ohren. | Place the mask over the chin and pull the ear loops behind the ears.

Stellen Sie sicher, dass der Nasenbügel auf dem Nasenbein liegt. | Make sure the nose clip rests on the bridge of the nose.

Passen Sie den Nasenbügel mit beiden Händen Ihrer Nasenform an, um eine optimale Abdichtung und sicheren Sitz im Nasenbereich zu ermöglichen. | Adjust the nose clip to the shape of the nose to create a perfect seal.

Überprüfen Sie, ob die Maske dicht an Ihrem Gesicht anliegt. Umschließen Sie dazu die Maske mit beiden Händen und atmen Sie stoßartig aus. | Check that the mask fits tightly. To do this, enclose the mask with both hands and exhale abruptly.

Bei Leckage passen Sie den Sitz der Maske und des Nasenbügels erneut an Ihre Gesichtsform an. | In case of leakage, adjust the fit of the mask and the nose clip.



Warn- & Sicherheitshinweise |

Beachten Sie alle Sicherheitshinweise und Einschränkungen bei der Verwendung dieses Produktes. Nichtbeachtung kann die Wirksamkeit verringern. |

Verwenden Sie nur Schutzmasken, die für Ihren Arbeitsbereich zulässig sind. Wenden Sie sich ggf. an das entsprechende Fachpersonal für Hygiene oder Arbeitsschutz. |

Verwenden Sie die Schutzmaske nur in ausreichend belüfteten Bereichen. Die Schutzmaske darf nicht in Bereichen mit geringem Sauerstoffanteil (Sauerstoffgehalt in Atemluft mind. 19,5 Val.%) benutzt werden. |

Sollte während der Benutzung Schwindel, Konzentrationsschwäche, Atemschwierigkeiten oder andere Beschwerden auf treten, verlassen Sie sofort den Arbeitsbereich. |

Entsorgen Sie die Schutzmaske nach Gebrauch entsprechend den örtlichen Entsorgungsvorschriften. |

Die Schutzmaske ist nur für den einmaligen Gebrauch vorgesehen. Eine bereits genutzte oder stark verschmutzte Schutzmaske nicht wieder-/weiterverwenden, sondern sofort entsorgen. |

Beachten Sie die Wechselintervalle der Schutzmaske gemäß den Arbeitsschutzrichtlinien Ihres Arbeitsplatzes/Arbeitsbereiches. Die Maske ist sofort zu wechseln wenn sie beschädigt ist oder der Atemwiderstand ansteigt. Verwenden Sie die Maske nicht länger als eine Arbeitsschicht. |

Bartbearbeitung kann Dichtsitz beeinträchtigen. |

Die Maske darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwendet werden. |



Hersteller | Manufacturer



Vor Lichteinstrahlung schützen |
Protect from exposure to light



Feuchte der Lagerbedingungen |
Humidity of storage conditions



Temperaturbereich der Lagerbedingungen |
Temperature of storage conditions



Einwegprodukt | disposable product



LOT Chargennummer | Batch number



Ende der Lagerzeit | End of storage period



Wuhan Zonsen Medical Products Co., Ltd
Chengbei Industry Zone, Zhucheng Avenue, Xinzhou District,
Wuhan City, China

CE 2834

CCQS Certification Services Limited.
add: Block 1 Blanchardstown Corporate Park,
Ballycoolin Road, Blanchardstown,
Dublin15, D15 AKK1, Ireland

Vertrieb durch
medika GmbH
Stüding 84
D-95032 Hof

Art.-Nr. ZFSM-01

LOT 21BHB0022

2024/01/19